

PODOLOG NOVA²

ČISTÍČÍ A SERVISNÍ SET

Příručka



CONETA

Dodavatel:

Coneta s.r.o., Iř. T. Bati

areál Toma, a.s., bud. 45a, 765 02 Otrokovice

tel.: +420 577 663 668, fax. +420 577 663 691

gsm: +420 603 889 416

e-mail: coneta@coneta.cz

www.coneta.cz, www.coneta.eu

prosinec 2011

Obsah:

01 OBSAH DODÁVKY

- 1.1. Čistící a montážní set
- 1.2. Videoukázka na internetu
- 3.3. Technický náčrtek sestavy součástek

02 PŘÍPRAVA

- 2.1. Odšroubování pouzdra z ručního dílu
- 2.2. Odstranění ochranné pásky
- 2.3. Odšroubování upínací jednotky
- 2.4. Odšroubování uzavíracího ložiskového šroubu
- 2.5. Vyjmutí předního ložiskového pouzdra
- 2.6. Rozebrání kleštinového pouzdra

03 ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA DÍLŮ

- 3.1. Výměna opotřebovaných dílů.
- 3.2. Vyčištění zadního kleštinového pouzdra
- 3.3. Vyčištění rozšroubovaných součástí

04 ZPĚTNÁ MONTÁŽ

- 4.1. Vsazení nových unášecích válečků
- 4.2. Vsazení kleštin
- 4.3. Vložení zadního kleštinového pouzdra do pouzdra sestavy kleštin
- 4.4. Zašroubování uzavíracího šroubu ložisek
- 4.5. Montáž kleštinové jednotky na mikromotor
- 4.6. Vsazení frézy na doraz a otáčení kleštinovou jednotkou
- 4.7. Nalepení zabezpečovací pásky
- 4.8. Nasazení pouzdra na ručního dílu a zašroubování

05 PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 5.1. Příslušenství pro čištění
- 5.2. Montážní klíč




UPOZORNĚNÍ!

Dodržujte pokyny výrobce a postupujte podle návodu na použití!
Kvůli prachovým částicím noste při čištění roušku. Vydezinfikujte si své pracoviště a přístroj pomoci vhodného dezinfekčního prostředku na plochy.

01 OBSAH DODÁVKY


1.1. Čistící a montážní set (číslo artiklu 11062)

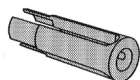


1x kleštiny




3x unášecí válečky

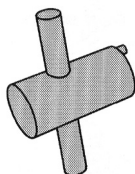

1x montážní klíč

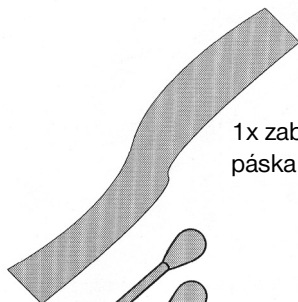


1x zabezpečovací páska

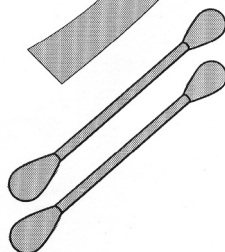

2x vatové tyčinky


1.2. Videoukázka na internetu

K této příručce je Vám k dispozici videoukázka na internetu: www.coneta.cz v oddílu „Ke stažení“ – „Návody, pomůcky“, kde jsou detailně ukázány všechny pracovní kroky uvedené v návodu.

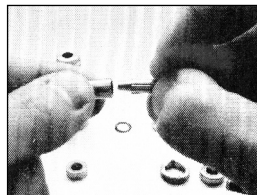

1.3. Označení jednotlivých dílů

V tomto přehledu najdete všechny součástky kleštinové jednotky s jmenovitým přiřazením, stejně jako správné pořadí jednotlivých součástí.

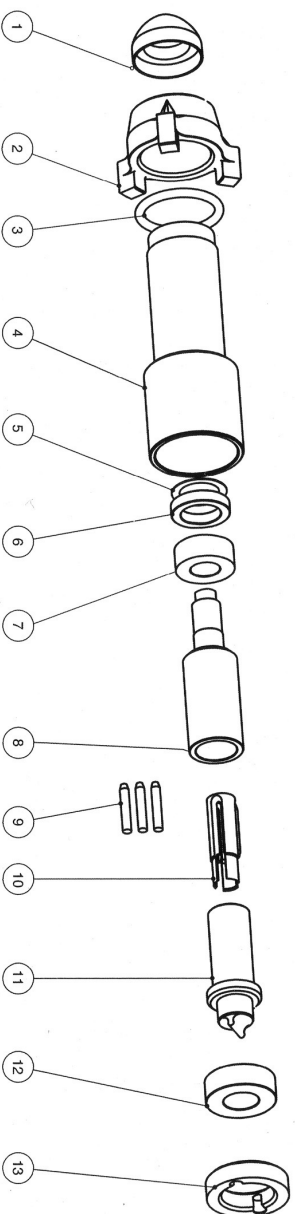


Pozice	Název	Pozice	Název
1	Krycí čepička	8	Přední kleštinové pouzdro
2	Hvězdicové pouzdro	9	Unášecí válečky
3	O-kroužek	10	Kleštiny
4	Pouzdro sestavy kleštin	11	Zadní kleštinové pouzdro
5	Pérová vložka	12	Kuličkové ložisko
6	Uzavírací vložka	13	Uzavírací šroub ložisek
7	Kuličkové ložisko		


02 PŘÍPRAVA

Vypněte přístroj Podolog Nova2 a vytáhněte ze zásuvky.


2.1. Odšroubujte pouzdro z ručního dílu.

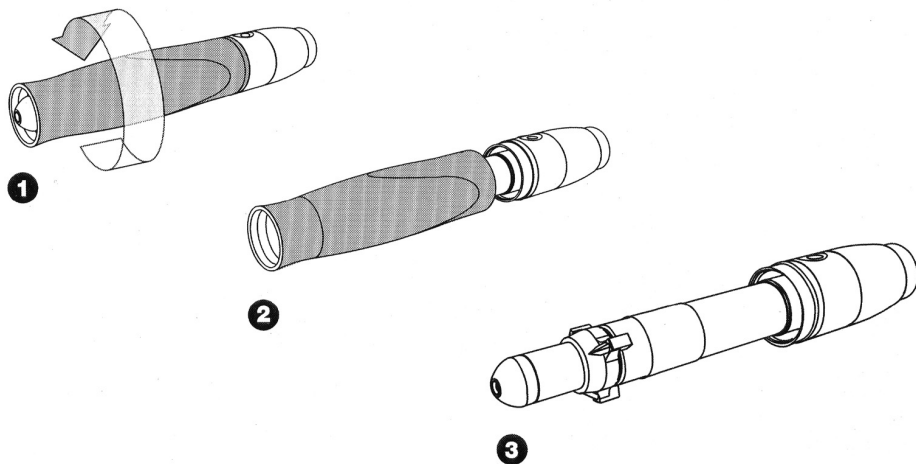


2.2. Odstraňte zabezpečovací pásku (očistěte zbytky lepidla).

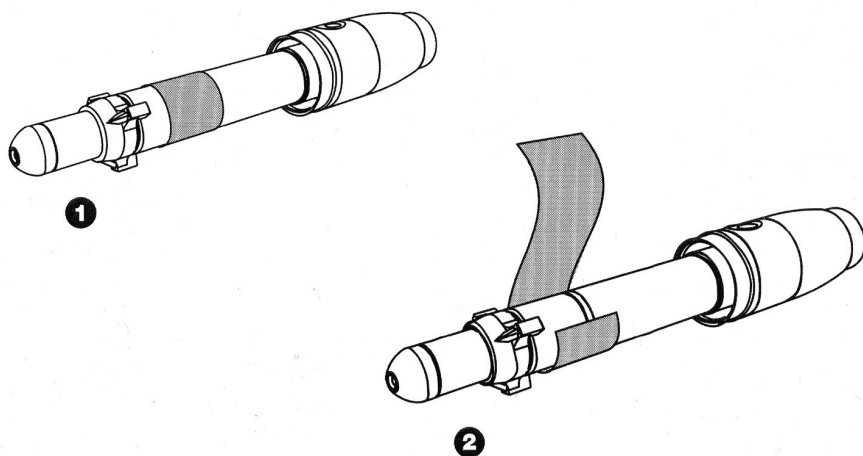

2.3. Odšroubujte kleštinovou jednotku.

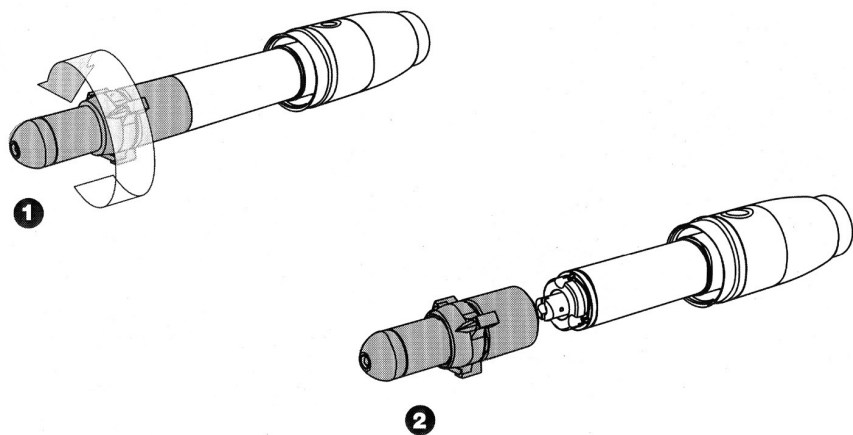


2.4. Vyšroubujte uzavírací šroub ložisek.

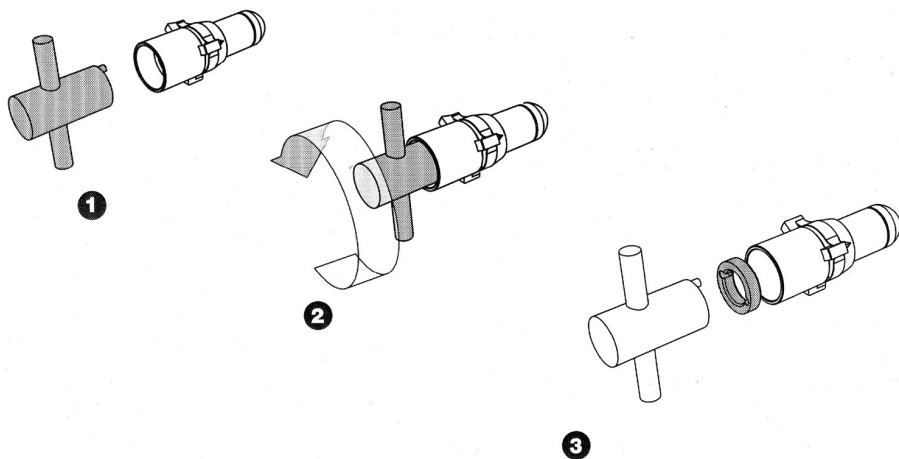


2.5. Vyměňte kleštinovou sestavu z pouzdra.

Pro snadné vyjmutí kleštinové sestavy poklepejte kleštinovou jednotkou o pevnou dřevěnou podložku, na níž dejte kousek látky kvůli ochraně podložky.

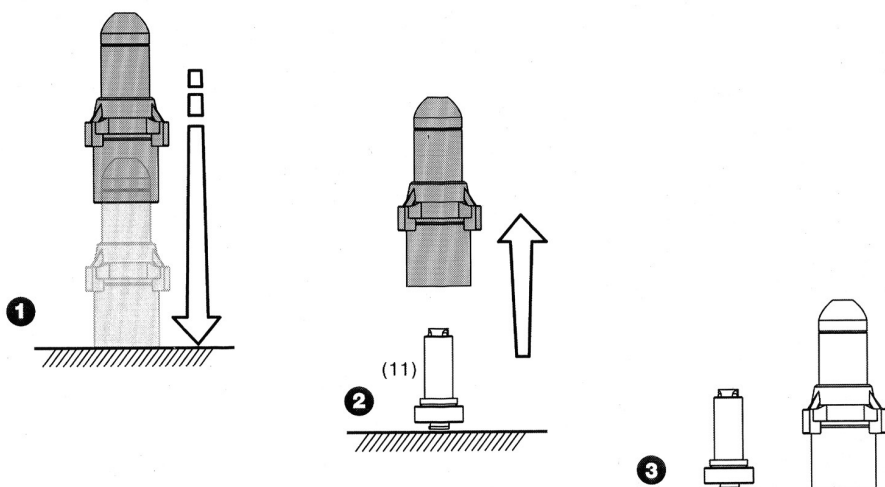


2.6. Vyměňte kleštiny a unášecí válečky.

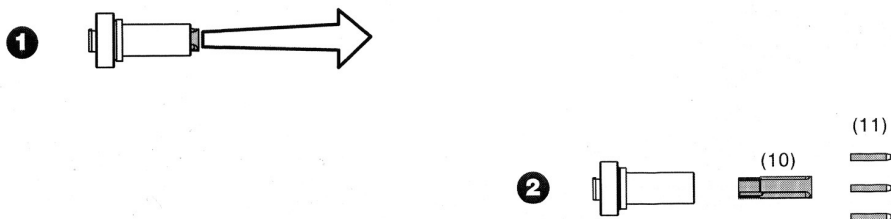

03 ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA DÍLŮ


3.1. Opatřebované díly vyměňte.

Opatřebované kleštiny a unášecí válečky vyhod'te.

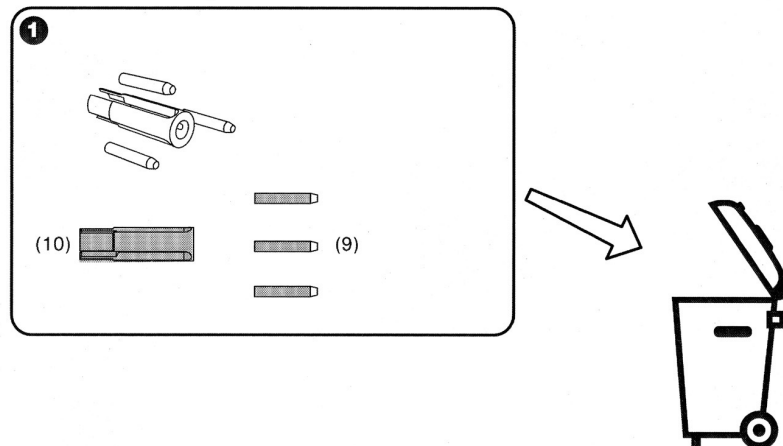


3.2. Vyčistěte zadní kleštinové pouzdro.

Poklepejte pouzdem o pevnou podložku, usazený prach vypadne.

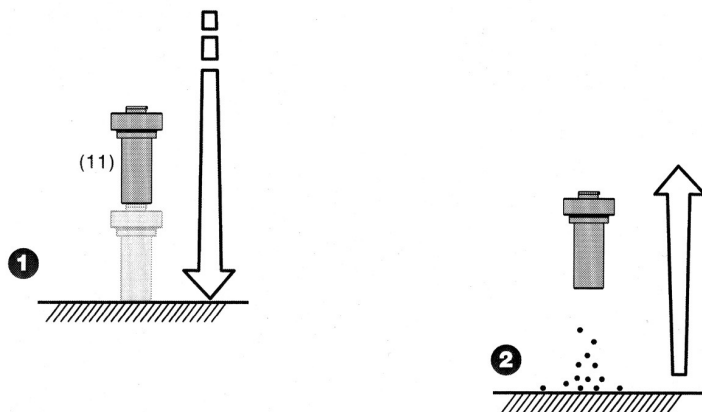


3.3. Vyčistěte všechny rozšroubované součásti pomocí vatových tyčinek a vyfoukejte vzduchem.

1

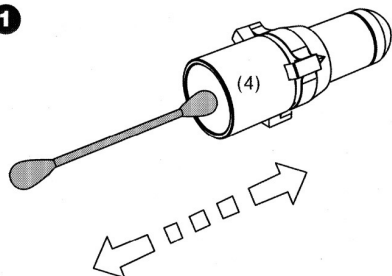


2

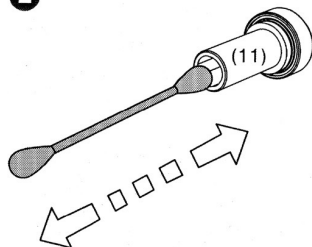


04 ZPĚTNÁ MONTÁŽ

4.1. Do nových kleštin vložte nové unášecí válečky.


Pozor! Sražená hrana unášecího válečku musí být vložena směrem k pevné straně kleštin!

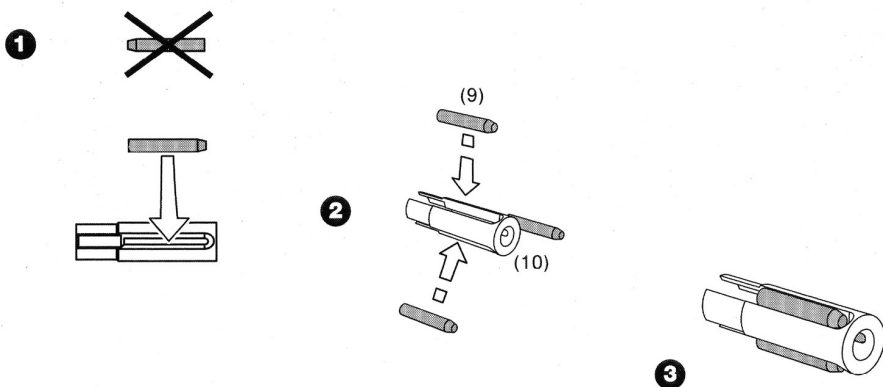


4.2. Vložte kleštiny správně do zadního kleštinového pouzdra. Pro snadnější vložení lehce otáčejte kleštinami kolem osy.

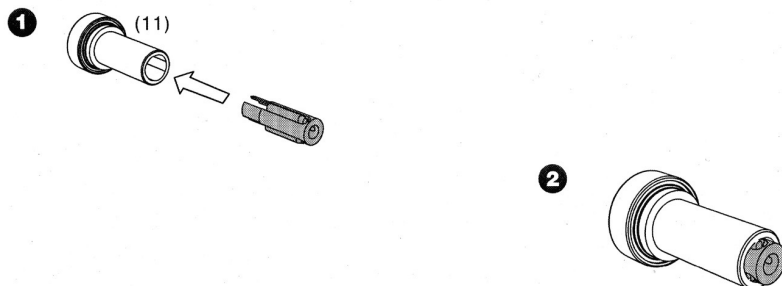

4.3. Vložte zadní kleštinové pouzdro do pouzdra sestavy kleštin.

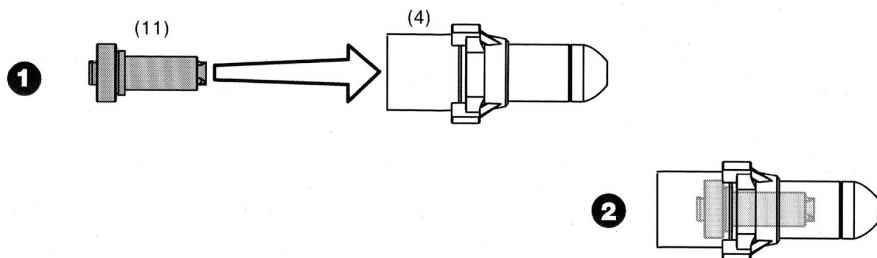

4.4. Zašroubujte uzavírací šroub ložisek.

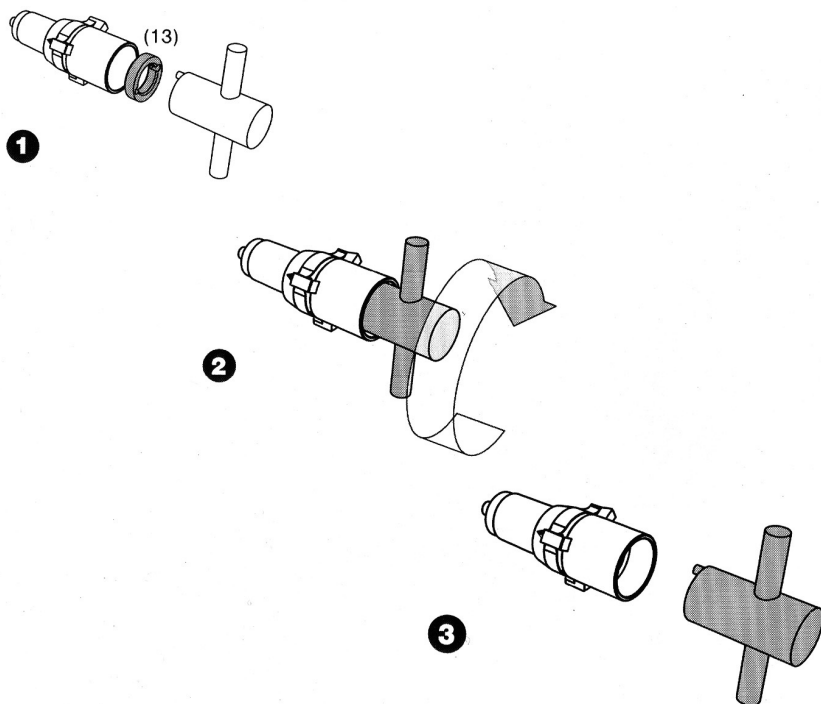

4.5. Montáž kleštinové jednotky na mikromotor.


Nasadte kleštinovou jednotku na unašeč mikromotoru!

Pozor! Pamatujte, že hřeben jednotky (A) zapadne do unašeče mikromotoru (B) jen tehdy, když hřeben dosedne do vybrání unašeče!

Nasadte kleštinovou jednotku hřebenem proti vybrání unašeče a lehce šroubujte. Pokud nedosedne kleštinová jednotka lehce na těleso unašeče (zůstane malá mezera cca 0,5 – 1 mm), znamená to, že hřeben nedosedl do vybrání unašeče. Potom pokračujte podle odstavce 4.6!


Pokud přesto oba díly utáhnete, půjde sice nějakou dobu s přístrojem pracovat, pak dojde k rychlému poškození a opotřebení hřebene a unašeče. Oprava je náročná a není předmětem záruky !!!

Pokud je dosednutí úplné a lehce zašroubovatelné nadoraz, utáhněte silně v prstech oba díly a nalepte zabezpečovací pásku podle bodu 4.7.

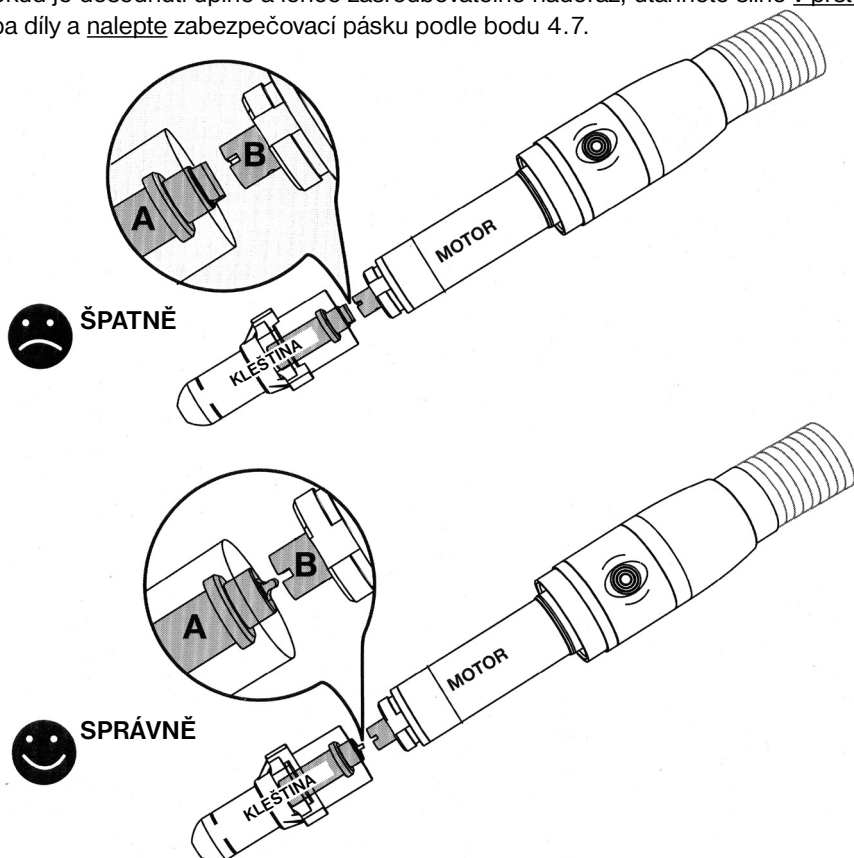


4.6. Vsaďte frézu do kleštin na doraz a otáčejte kleštinovou jednotkou.


Pokud nejde kleštinová jednotka úplně a lehce našroubovat, nasad'te jakoukoliv frézu a lehkým otáčením najdete správnou pozici částí A a B a šroubujte až do úplného dosednutí.

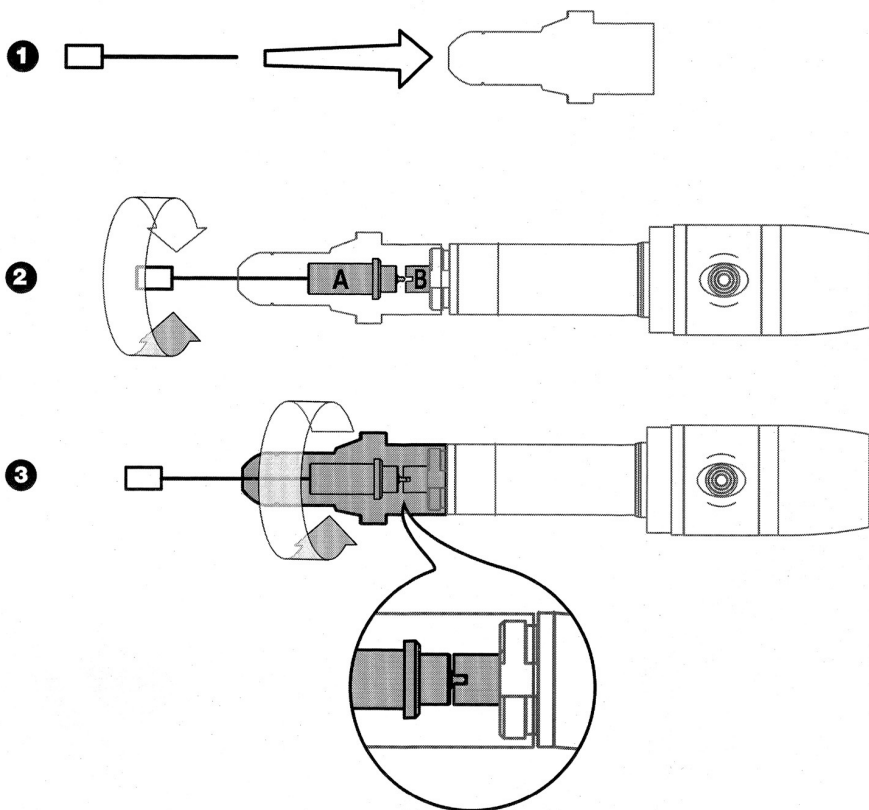

4.7. Nalepte zabezpečovací pásku.

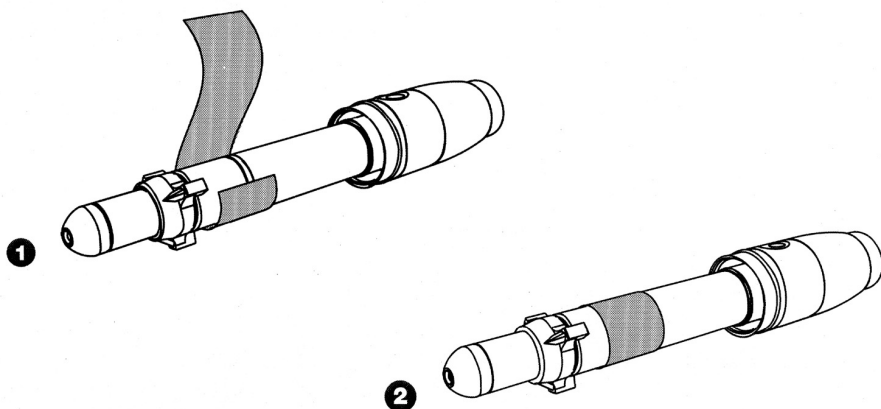

4.8. Nasad'te pouzdro na ruční díl a zašroubujte.

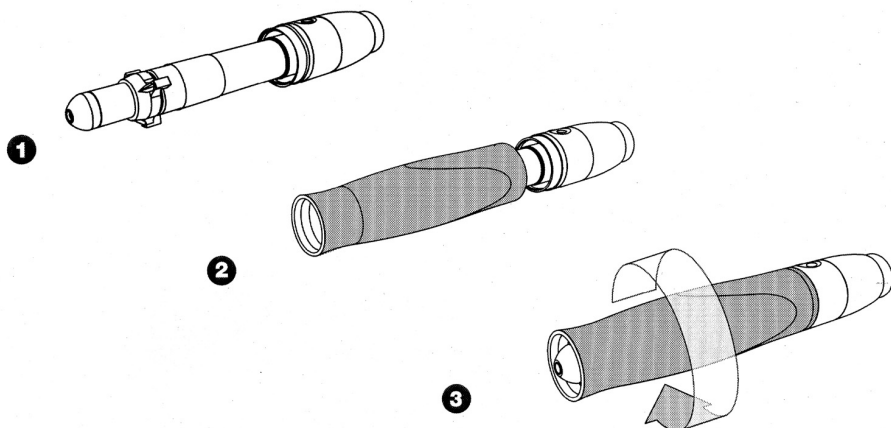

Jakmile budete mít složeny všechny díly podle popisu, připojte přístroj Podolog Nova do sítě, vsad'te libovolnou frézu, zapněte mikromotor a vyzkoušejte, zda fréza správně pracuje.


Případné další informace Vám rádi poskytneme v servisním středisku Coneta.

05 PŘÍSLUŠENSTVÍ

5.1. Příslušenství pro další čištění.

Pro další čištění, popř. pro další přístroje doporučujeme použít vždy nové kleštiny a nové jehly. Tyto si lze objednat u firmy Coneta.


Příslušenství čistícího setu /číslo artiklu 11063/

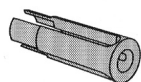


1x kleštiny



3x jehly

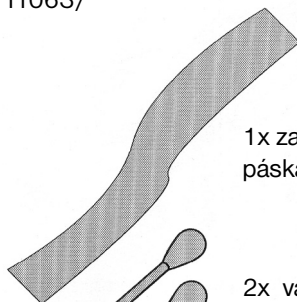

1x zabezpečovací páska

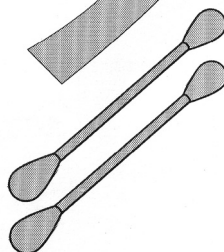

2x vatička

5.2. Montážní klíč

číslo artiklu 11061

